



# Nordisk Synsupport AB

Informationsteknik för synskadade



**PÅ/AV** : Längst till höger på kontrollpanelen. Tryck uppåt för att slå på systemet och nedåt för att stänga av.



**Förval 1, 2 & 3** : Tryck på en av knapparna för att välja en av tre förprogrammerade förstoringar.



**Zoom**: Tryck brytaren uppåt för att öka förstoringen och nedåt för att minska förstoring.



**Färg, svart/vit bild**: Tryck brytaren uppåt för färg och nedåt för svart/vit bild.



**Negativ / Positiv bild** : Kontrollen fungerar endast i svart / vitt läge. Vrid ratten till vänster eller höger för att välja negativ alternativt positiv bild. Gråskala får du om du ställer ratten i mittläge.