









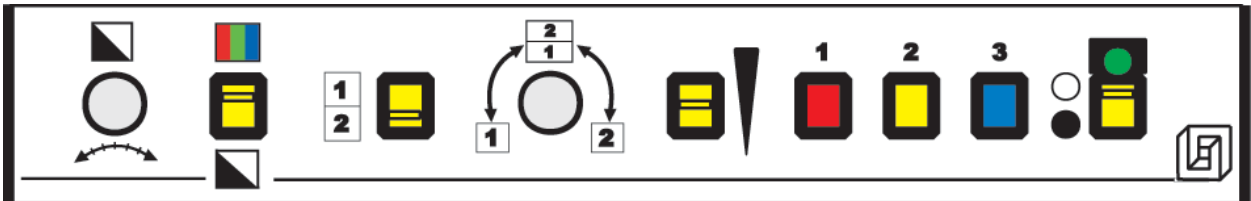

Kontrollpanelen - Kortmanual

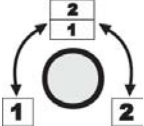

-  **På/Av:** Längst till höger på kontrollpanelen. Tryck uppåt för att slå på systemet och nedåt för att stänga av.
-  **Förval 1, 2 & 3:** Tryck på en av knapparna för att välja en av tre förprogrammerade förstorningar.
-  **Zoom:** Tryck brytaren uppåt för att öka förstoringen och nedåt för minskad förstoring.
-  **Bilddelning:** Vrid ratten för steglös delning mellan stativkamera (1) och avståndskamera (2).
-  **Kamera 1/Kamera 2:** Välj vilken av kamerorna som skall styras via kontrollpanelen. Tryck brytaren uppåt för att välja stativkameran eller nedåt för att välja avståndskameran.



>> *Forts. föregående sida*

6.  **Färg, svart/vit bild:** Tryck brytaren uppåt för färg och nedåt för svart/vit bild.
7.   **Negativ/Positiv bild:** Kontrollen fungerar endast i svart/vitt läge. Vrid ratten till vänster eller höger för att välja negativ alternativt positiv bild. Gråskala får du om du ställer ratten i mittläge.